

1. Denominación Comercial		Fabricante	Nº. Revisión	Nº. Ficha
LEUKOPLAST ESPARADRAPO DE TELA		BSN MEDICAL LIMITADA COLOMBIA	5	FT – 001
2. Descripción y Empaque de producto				
NART / BNR	Descripción	Empaque		
71123-00	Leukoplast Tela 1/2" x 1yd (Color Blanco)	Plegadiza x 24 UN. 18 plegadizas x caja corrugada, 432 UN x caja corrugada		
71123-01	Leukoplast Tela 1" x 1yd (Color Blanco)	Plegadiza x 12 UN. 24 plegadizas x caja corrugada, 288 UN x caja corrugada		
71124-00	Leukoplast Tela 1/2" x 5yd (Color Blanco)	Plegadiza x 12 UN. 12 plegadizas x caja corrugada, 144 UN x caja corrugada		
71124-02	Leukoplast Tela 1" x 5yd (Color Blanco)	Plegadiza x 6 UN. 24 plegadizas x caja corrugada, 144 UN x caja corrugada		
71124-04	Leukoplast Tela 2" x 5yd (Color Blanco)	Plegadiza x 6 UN. 24 plegadizas x caja corrugada, 144 UN x caja corrugada		
71124-05	Leukoplast Tela 3" x 5yd (Color Blanco)	Plegadiza x 6 UN. 24 plegadizas x caja corrugada, 144 UN x caja corrugada		
71124-06	Leukoplast Tela 4" x 5yd (Color Blanco)	Plegadiza x 6 UN. 12 plegadizas x caja corrugada, 72 UN x caja corrugada		
72387-00	Leukoplast Tela 1/2" x 5yd TA (Color Blanco)	Plegadiza microcanal x 12 tarjetas		
72387-01	Leukoplast Tela 1" x 5yd TA (Color Blanco)	Plegadiza microcanal x 12 tarjetas		
76821-01	Leukoplast Tela 1" x 10yd, 12 Rollos (Color Blanco)	24 tubos tipo hospital por caja corrugada. Cada tubo contiene: 12 rollos de 1" x 10yd.		
76822-01	Leukoplast Tela 2" x 10yd, 6 Rollos (Color Blanco)	24 tubos tipo hospital por caja corrugada. Cada tubo contiene: 6 rollos de 2" x 10yd.		
71120-00	Leukoplast Tela 3" x 10yd, 4 Rollos (Color Blanco)	24 tubos tipo hospital por caja corrugada. Cada tubo contiene: 4 rollos de 3" x 10yd.		
71120-01	Leukoplast Tela 4" x 10yd, 3 Rollos (Color Blanco)	24 tubos tipo hospital por caja corrugada. Cada tubo contiene: 3 rollos de 4" x 10yd.		
71122-00	Leukoplast Tela 12 x 10yd, Surtido (Color Blanco)	24 tubos tipo hospital por caja corrugada. Cada tubo contiene: 1 rollo de 1", 2 rollos de 2", 1 rollo de 3" y 1 rollo de 4"		
01621-00	Leukoplast Adhesive Tape Color Piel 1.25cm x 5m	Plegadiza x 12 UN. 12 plegadizas x caja corrugada, 144 UN x caja corrugada		
01622-00	Leukoplast Adhesive Tape Color Piel 2.5cm x 5m	Plegadiza x 6 UN., 24 plegadizas x caja corrugada, 144 UN x caja corrugada		
01624-00	Leukoplast Adhesive Tape Color Piel 5cm x 5m			
01625-00	Leukoplast Adhesive Tape Color Piel 7.5cm x 5m			
01562-04	Leukoplast 1m x 2.5cm (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)			
01621-02	Leukoplast 4.5m X 1.25cm Hosp (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)	Carreto sin protector, protegido con una película termoencogible. Plegadiza x 10 UN, 50 plegadizas x caja corrugada, 500 UN x caja corrugada		
01622-02	Leukoplast 4.5m x 2.5cm. (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)	Carreto con protector. Plegadiza x 10 UN, 25 plegadizas x caja corrugada. 250 UN x caja corrugada.		
01622-03	Leukoplast 4.5m x 2.5cm Hosp. (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)	Carreto sin protector protegido con una película termoencogible. Plegadiza x 10 UN, 25 plegadizas x caja corrugada, 250 UN x caja corrugada.		
01624-03	Leukoplast 4.5m x 5cm. (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)	Carreto con protector. Plegadiza x 10 UN, 20 plegadizas x caja corrugada. 200 UN x caja corrugada.		
01624-04	Leukoplast 4.5m x 5cm Hosp. (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)	Carreto sin protector protegido con una película termoencogible. Plegadiza x 10 UN, 20 plegadizas x caja corrugada, 200 UN x caja corrugada.		
01625-03	Leukoplast 4.5m x 7.5cm. (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)	Carreto con protector. Plegadiza x 10 UN, 12 plegadizas x caja corrugada. 120 UN x caja corrugada.		
01625-04	Leukoplast 4.5m x 7.5cm Hosp. (Microperforado color piel- Comercializado en Indonesia)	Carreto sin protector protegido con una película termoencogible. Plegadiza x 10 UN, 12 plegadizas x caja corrugada, 120 UN x caja corrugada.		

NART / BNR	Descripción	Empaque			
01561-02	Leukoplast, 1m x 1.25cm (Microperforado color piel- Comercializado en Filipinas)	Carreto con protector. Plegadiza x 20 UN, 100 plegadizas x caja corrugada. 2000 UN x caja corrugada.			
01562-02	Leukoplast, 1m x 2.5cm (Microperforado color piel- Comercializado en Filipinas)	Carreto con protector. Plegadiza x 20 UN, 24 plegadizas x caja corrugada 480 UN x caja corrugada.			
01521-00	Leukoplast 5m x 1.25cm (Microperforado color piel- Comercializado en Filipinas)	Carreto con protector. Plegadiza x 24 UN, 10 plegadizas x caja corrugada. 240 UN x caja corrugada.			
01522-00	Leukoplast 5m x 2.5cm (Microperforado color piel- Comercializado en Filipinas)	Carreto con protector. Plegadiza x 12 UN, 10 plegadizas x caja corrugada 120 UN x caja corrugada.			
01524-02	Leukoplast 5m x 5 cm (Microperforado color piel- Comercializado en Filipinas.)	Carreto con protector. Plegadiza x 6 UN, 10 plegadizas x caja corrugada 60 UN x caja corrugada.			
47725-01	Leukoplast 5m x 7.5 cm (Microperforado color piel- Comercializado en Filipinas)	Carreto con protector. Plegadiza x 4 UN, 10 plegadizas x caja corrugada 40 UN x caja corrugada.			
47726-01	Leukoplast 5m x 10 cm (Microperforado color piel- Comercializado en Filipinas)	Carreto con protector. Plegadiza x 4 UN, 10 plegadizas x caja corrugada 40 UN x caja corrugada.			
72393-01	Leukoplast Tube 9.2 x 1.25 / 2.5 / 5.0 / 7.5 (Microperforado color blanco- Comercializado en Filipinas)	24 tubos blancos por caja corrugada Cada tubo contiene: 4 UN x 1.25 cm, 3 UN x 2.5 cm, 2 UN x 5 cm, 1 UN x 7.5cm			
Nombre genérico		Forma cosmética		Producto Importado	
CINTA ADHESIVA DE USO MEDICO		N/A		SI	NO X
3. Registro Sanitario o Notificación Sanitaria					
Numero Registro Sanitario		Notificación Sanitaria		Fecha de vigencia del Registro/ Notificación Sanitaria	
INVIMA 2011DM-0006944		N/A		14.02.2021	
Modalidad de Registro Sanitario			Titular del Registro Sanitario/ Notificación Sanitaria		
Fabricar y Vender		X		BSN MEDICAL LIMITADA	
Importar y Vender		NA			
Importar Semi-Elaborar y Vender		NA			
Clasificación del Riesgo		I		Productor	X
¿El Dispositivo Medico Es Reutilizable?		No		Distribuidor	X
4. Descripción					
Esparadrappo de tela. Usado como material auxiliar en procesos de curación y otros. Ideal para asegurar o fijar gasas, apósitos y vendajes.					
5. Composición				Tipo / Grado	
Soporte: Tela de algodón 100% o tela viscosa 100%. Adhesivo: Caucho Natural, Poliisobutileno, Oxido de Zinc, Lanolina, Aceite Mineral, 2,2 Metilene-bis (6-tert-butyl-p-cresol), Propilendinitrilo-di-o-cresol, Acetato de Etilo, Resina Colofonia, Resinas Terpenofelonicas , Isopropanol, Disolvente Alifático (1A)				TECNICO	
Nomenclatura				N/A	
6. Características del producto		Método de análisis		Tolerancia	
Poder adhesivo en acero(N/cm)		Tpo 6305-1		2.0 - 4.0	
Tensión de desbobinado		Tpo 6303-3		Max. 3.0	
Bioburden (UFC/g)		Tpo 6314-17		Max. 100	
7. Recomendaciones de uso					
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Usado para fijar gasas o apósitos (No colocar directamente sobre la herida) ✓ Únicamente de uso externo. Se recomienda cambiarlo cada 6 horas, dependiendo de las condiciones de la piel y las indicaciones del personal médico. ✓ Usar sobre la piel limpia, seca, libre de grasa, suciedad y cualquier sustancia química que pueda afectar el desempeño del adhesivo. ✓ Recomendado para un solo uso. Después de desprender el material de la piel, este pierde adhesividad, por lo tanto al tratar de adherirlo nuevamente, su desempeño no es el mismo. ✓ Fabricado con tela con hidrorrepelente, el cual impide que la piel se humedezca, sin embargo este mismo efecto, dificulta la normal transpiración de la piel y produce acumulación de sudor. ✓ En usos prolongados ó de alto estrés y sudoración por parte del paciente, el esparadrappo puede perder adhesividad y desprenderse. ✓ El adhesivo de este producto es fabricado con cauchos naturales (Látex). La presencia del látex natural, puede causar en casos aislados alergias y/o enrojecimientos sobre la zona aplicada. No se debe usar en personas con antecedentes alérgicos al látex. Si se presenta alguna reacción desfavorable a este producto, descontinuar su uso. 					
BSN MEDICAL LTDA., garantiza el cumplimiento de las especificaciones dadas. Sin embargo, esto no exonera al cliente de realizar sus propias pruebas y comprobar si el producto se adapta a sus necesidades específicas.					
BSN MEDICAL LTDA., solo reconocerá reclamaciones, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de despacho, cuando se compruebe que alguno de los parámetros de calidad dados en esta ficha técnica, se encuentran por fuera de las especificaciones establecidas. En toda reclamación, el producto debe estar dentro de su empaque original.					

8. Rotulado											
Se identifica con el nombre del producto, presentación, número de lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, nombre del fabricante, nombre del distribuidor y registro sanitario. La corrugada se identifica con el nombre del producto, presentación y contenido por caja corrugada.											
9. Condiciones de almacenamiento											
Lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol. Temperaturas no mayores a 35°C y humedad relativa no mayor a 85%.											
10. Tiempo de vida											
36 meses a partir de la fecha de producción, almacenado bajo condiciones especificadas.											
11. Información complementaria para Registro Sanitario											
Se cuenta con controles y generación de reportes de Tecnovigilancia							SI	X	NO	N/A	
Elaborada por			Revisada por			Aprobada por			Fecha		
									Día	Mes	Año
Claudia Lucy Gonzalez Analista de Calidad			Diana Marcela Montes Coordinadora Técnica y Asuntos Regulatorios			Maria Fernanda Arias Gerente Gestión de Calidad			08	06	2016
Fecha			Fecha			Fecha					
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año			