



FICHA TÉCNICA
BARRERAS PROTECTORAS DE PIEL SUR-FIT PLUS® STOMAHESIVE®

PROVEEDOR: BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO A CALIFICAR

PRODUCTO	
Nombre Genérico	Barreras protectoras de piel
Nombre Comercial	Barreras protectoras de piel con Stomahesive® Sur-Fit Plus®
Descripción	Barrera con protector cutáneo Stomahesive® elaborado a base de hidrocoloides suspendidos en una película de polietileno y provisto de un aro Sur-Fit Plus® flexible.
Marca	ConvaTec
Fabricante	ConvaTec Inc – USA ConvaTec Dominica Republic Inc – Republica Dominicana
Composición del Producto	La Barrera Protectora de Piel Stomahesive® está compuesta por hidrocoloides: Carboximetilcelulosa Sódica, pectina, gelatina y poliisobutieno. Una película de polietileno en su cara externa y un aro Sur-Fit Plus® flexible. Adicional a lo anterior, las barreras flexibles cuentan con un Collar fabricado para los alrededores del disco Stomahesive® con material de respaldo adhesivo.
Características y Acciones del Producto	Protección de la Piel: las sustancias hidrocoloides absorben la humedad y tienen capacidad de regenerar la piel irritada. Adhesión seco a Húmedo: se adhieren a la piel seca y absorben la humedad producida por la transpiración, manteniendo la piel íntegra y protegida. Puede permanecer en su sitio hasta por siete días. Impermeabilidad: La película de polietileno que cubre la barrera impide el paso de líquidos permitiéndole al paciente tomar su ducha diaria e incluso entrar a una piscina. Prolonga su tiempo de uso. Barreras Protectoras 100% en hidrocoloides (Regulares) y con adhesivo microporoso (Flexibles): adaptables a los diferentes tipos de abdomen
Usos	Ostomías Digestivas: Ileostomías, yeyunostomías, Colostomías Ostomías Urinarias: vesicostomías, ureterostomías, y derivaciones urinarias
Recomendaciones de Uso	Se recomienda leer el instructivo de aplicación disponible en el empaque antes de su aplicación. <ul style="list-style-type: none"> • Medir el diámetro del estoma y valorar las condiciones de la piel circundante • Limpiar la piel circundante con agua limpia y jabón suave • Remover las sustancias grasosas de la piel circundante y secar perfectamente el área peristomal • Elegir la barrera de un tamaño de aro que sobrepase por lo menos 12mm el tamaño del diámetro del estoma • Ampliar el orificio de la barrera protectora Stomahesive® al tamaño del estoma • Aplicar pasta Stomahesive® o polvo Stomahesive® según necesidad • Aplicar la Barrera sobre la piel haciendo un masaje sobre está para asegurar su fijación.
Registro Sanitario	INVIMA 2011DM-000028-R1 VIGENCIA: MARZO 10 DE 2021
Presentaciones:	Barreras Protectoras de Piel Stomahesive® Regulares: Medidas: 100mm - 70mm – 57 mm – 45mm – 38 mm Caja x 5 Unidades C/U Barreras Protectoras de Piel Stomahesive® Flexibles: Medidas: 70mm – 57 mm – 45mm – 38 mm Caja x 5 Unidades C/U



**FORMATO DE CALIFICACIÓN
BARRERAS PROTECTORAS DE PIEL SUR-FIT PLUS® STOMAHESIVE®**

Calificación de 1 a 5: 5= Excelente 1= Malo

PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LA INSTITUCION

Concepto Técnico					
Facilidad de Aplicación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Adhesión	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Capacidad de Protección de la Piel	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Resistencia a los Drenajes	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Acceso al Estoma	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Facilidad de Remoción:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Duración	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Comodidad para el Paciente:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Empaque:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Presentación:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Calidad:	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Servicio Post-Venta: Asesoría Educativa y Servicio al cliente.	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
Otros:					
Observaciones:					
Calificación:					
Nombre del Calificador:					
Cargo:					
Fecha:					
Firma:					