

## BD CHLORAPREP- APLICADOR

### Descripción

Aplicador estéril fabricado en Polipropileno de alta densidad, con solución de Gluconato de Clorhexidina ( CHG) al 2% p/v + Alcohol Isopropílico (IPA) al 70%. Solución cutánea/solución estéril

### Indicación de Uso

Para Asepsia de la piel antes de la Inyección o para la preparación para un procedimiento quirúrgico.

### Composición de Producto

Aplicador de plástico, Ampolla de vidrio (Borosilicato), Esponja o Gasa y Compresa

### Características

**La solución estéril** minimiza el riesgo de contaminación microbiana intrínseca.

**El aplicador estéril** facilita la técnica aséptica sin contacto (ANTT®).

**Acción Rápida:** Elimina una amplia variedad de microorganismos residentes en la piel.

**Efecto residual persistente:** Mantiene su acción antiséptica documentada de 48 horas.

**Amplio Espectro:** Es efectivo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo Sthaphylococcus aureus resistente a Metilicina (SARM) y Enterococcus resistente a Vancomicina (ERV), Clostridium Difficile, Acinetobacter, la mayoría de los virus y hongos.

**Activo en presencia de Bioproductos Rico en Proteínas:** permanece activo en presencia de Sangre, Suero y otros Bioproductos ricos en proteína.

**Técnica:** Los aplicadores estériles y desechables, elimina el contacto directo con la zona de preparación, contribuyendo a reducir la contaminación cruzada.

**Esponja de Fricción:** La consistencia de la esponja para fricción suave, garantiza que la solución penetre las 5 primeras capas de la piel donde reside el 80% de los microorganismos.

### Medidas de Seguridad

Solo para uso externo sobre la piel.

No usar en menores de 2 meses de edad.

Evitar el contacto con membranas mucosas, ojos. Si la solución entra en contacto debe de lavarse inmediatamente con abundante agua.

Evitar su uso en heridas abiertas.

Evitar el contacto con el tejido Neural y Oído Medio.

Solución inflamable.

No cubra la zona a intervenir o use una fuente de Electrocauterio hasta que la solución este completamente seca (tiempo de secado: 1 a 3 minutos).

### Condiciones de Almacenamiento

Producto inflamable. Almacenar a temperatura ambiente (entre 15 ° y 30 °C).

SKU	Descripción	Unidad de Empaque
665480	ChloraPrep 1mL	60 aplicadores x caja
665400	ChloraPrep 3mL clear	25 aplicadores x caja

### Nombre Genérico



Aplicador Estéril con Gluconato de Chlorhexidina (CHG) al 2% y Alcohol Isopropílico al 70%

Registro Invima	INVIMA 2016DM-0014213
Fecha Vigencia Registro	1/13/2026
Fabricante	CareFusion, LLC 213-1550 Northwestern Drive
Importador	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA
Tipo de Dispositivo	NO INVASVO
Clasificación Riesgo	I
Vida útil	3 años



Responsable: Marketing MDS No. Revisión: 01 Ficha No. 001